


# Betriebsanleitung Bucinator PAULUS +

Paulus+

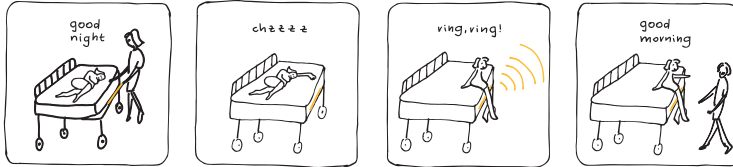

---

## 1. Sicherheitshinweise

---

### ZU BEACHTEN

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch von Bucinator, muss diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

### HINWEISE ZUR BENUTZUNG

- Das Bucinator System darf weder als Sicherheits- noch als Medizinprodukt deklariert werden.
- Das Bucinator System dient lediglich der Unterstützung des Pflegepersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz ist das Bucinator System auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen

---

## 2. Produktbeschreibung

---

### AUFBAU

Bucinator Paulus+ setzt sich aus einer Sensorleiste und einer Schutzhülle zusammen.



#### FUNKTION

1. Ein Bucinator-Pad seitlich am Rand des Bettes, im Ausstiegsbereich unter die Matratze legen.
2. Empfänger an Rufanlage anstecken.
3. System testen und Ruf auslösen

---

### 3. Reinigung/Desinfektion

---

Das System kann mit allen handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln, max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden.

Verwenden Sie keine ätzenden Mittel!

---

### 4. Batterie Management

---

Je nach Nutzung des Systems, hält die Knopfzelle mehrere Jahre lang.  
Blinkt die LED noch ca. 3 Sekunden nach, wechseln Sie bitte die Batterie.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Das Gerät aus der Schutzhülle nehmen.
2. Die Schrauben am Gehäuse mit Hilfe eines Schraubenziehers lösen und das Gehäuse öffnen.
3. Entnehmen Sie nun ggf. die alte Batterie und setzen Sie die neue ein. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs **CR2032**. Achten Sie auf die richtige Polung.
4. Verschließen des Batteriefaches und Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Systems.

#### ACHTUNG!

Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!  
Leere Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll!